



## FlexPen<sup>®</sup>

### Uputstvo za resuspenziju

Insulinski analog sa bifaznim dejstvom u sebi sadrži 30% rastvorljive i 70% protaminizirane komponente. Njegov profil dejstva oponaša fiziološko delovanje insulina mnogo bolje od fiksnih mešavina humanih insulina. Da bi ovaj profil bio postignut, neophodno je da se pre ubrizgavanja postigne potpuna resuspenzija i homogenizacija preparata.

Resuspenzija preparata je otežana ukoliko se preparat nalazi na temperaturi skladištenja (2°C do 8°C). Ukoliko pacijent čuva insulin u frižideru, savetujte mu da preparat ostavi na sobnoj temperaturi najmanje 30 min. pre upotrebe. Na ovaj način resuspenzija i homogenizacija će biti mnogo lakša i bolja.

Resuspenzija i homogenizacija se vrši na sledeći način: valjanjem pen brizgalice između dlanova 10 puta i potom okretanjem pen brizgalice gore-dole 10 puta. Na ovaj način se omogućava pomeranje staklene kuglice koja se nalazi u rezervoaru sa insulinom sa jednog kraja rezervoara na drugi čime se obezbeđuje homogenizacija preparata.

Postupak po potrebi treba ponavljati sve dok preparat ne postane ravnomerno zamućen i bele boje. Odmah nakon toga suspenziju treba ubrizgati.

Resuspenzija i homogenizacija se vrši pre svake upotrebe preparata.

Ukoliko je u FlexPen<sup>®</sup> brizgalici ostalo 12 jedinica ili manje, potpuna resuspenzija i homogenizacija nisu moguće. U tom slučaju, pacijent treba da upotrebi novu pen brizgalicu.



dugme za doziranje



pokazivač odabrane doze

dugme za ubrizgavanje

Dobro ujednačiti suspenziju insulina u brizgalici valjanjem FlexPen® brizgalice između dlanova i njenim okretanjem gore dole, na način prikazan na slici.



Zavrните novu NovoFine® iglu na FlexPen®. Skinite oba poklopca igle.



Odaberite željenu dozu insulina okretanjem dugmeta za doziranje u smeru kazaljke na satu. Ukoliko ste odabrali pogrešnu dozu insulina, jednostavno okrenite dugme za doziranje napred ili nazad dok ne odaberete željeni broj jedinica.



Skinite poklopac FlexPen® brizgalice i ubodite iglu u kožu. Ubrizgajte celokupnu dozu insulina pritiskanjem dugmeta za ubrizgavanje do kraja. Nakon ubrizgavanja sačekajte najmanje šest sekundi pre izvlačenja igle iz kože. Pažljivo vratite poklopac na iglu, odvrnite je i uklonite, a poklopac FlexPen®-a vratite na brizgalicu.



Ukoliko je u FlexPen® brizgalici ostalo 12 jedinica ili manje upotrebite novu pen brizgalicu.

